


# POSTUP VÝTĚRU Z NOSOHLTANU

1. Nasadte si ochranné pomůcky pro odběr.
2. Roztrhněte obal, uchopte odběrový tampón za konec tyčinky a vyjměte. Odběrovým tampónem se ničeho nedotýkejte, hrozí kontaminace vzorku!
3. Tampón jemně zasuňte přes nosní průduch až k zadní stěně nosohltanu (4-5cm). Zde tampón ponechte několik sekund za současného otáčení tak, aby co nejvíce nasákl slizničním sekretem.

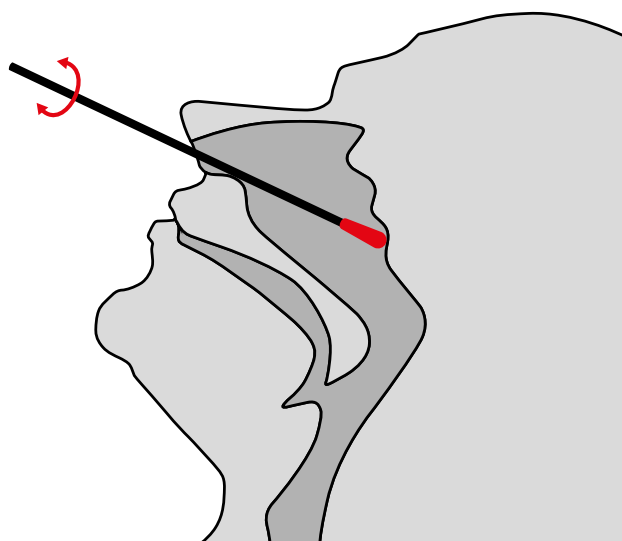

4. Tampón opatrně vyjměte a vložte do zkumavky s transportním médiem. Tyčinku zalomte, zkumavku pečlivě uzavřete a vložte do obou sáčků.



5. Zkumavku se vzorkem, společně s vyplněným a podepsaným formulářem *Žádanka s informovaným souhlasem k vyšetření SARS-CoV-2 (BF189)* dopravte do laboratoře na adresu: GENvia, s.r.o., Sýkovecká 276/54, 198 00 Praha 9. Doba od odebrání vzorku do předání laboratoři nesmí přesáhnout 24 hodin. Vzorek uchovejte při pokojové teplotě.